

# Table des Matières

## OR LIGHT

### I – PRESENTATION

A – Introduction

Technologie

Philosophie

B – Fiabilité

C – Nos engagements

### II – DEPILATION

A – Introduction

B – Comment ça marche ?

C – Des soins personnalisés

### III – Photolifting

A – Introduction

B – Comment ça marche ?

C – Des soins personnalisés

### IV – INFORMATIONS TECHNIQUES

# I – Présentation

## A – Introduction

### TECHNOLOGIE

Notre appareil OR LIGHT bénéficie de la technologie du SPL® (Square Pulse Light), une avancée majeure en matière de Lumière Pulsée. A la différence de la lumière pulsée classique, la technologie SPL® brevetée par Yperion permet de délivrer une énergie régulière pendant la durée du flash. La cible est donc chauffée de manière constante, garantissant la performance du rayon lumineux, pour des résultats parfaitement optimisés.

Appareil performant et hautement sécurisé, accessible aux professionnels du monde médico esthétique, OR LIGHT garantit une excellente efficacité de traitement non agressif, parfaitement adapté et indolore.

### PHILOSOPHIE

Depuis plus de 10 ans, nous avons engagé notre savoir au service de la beauté de la peau. Nous explorons continuellement de nouveaux territoires technologiques et scientifiques, afin d'élaborer les solutions de beauté du futur pour toutes les femmes et tous les hommes. YPERION a pour vocation de fournir un produit haut de gamme, dans le respect absolu du corps.

## B – Fiabilité

Afin de garantir un traitement optimal à vous clients, OR LIGHT dispose d'un **joulemètre** intégré qui permet de contrôler le niveau de stabilité des énergies lumineuses délivrées, assurant une efficacité à chaque flash. Le professionnel est ainsi sûr de fournir des soins de haute qualité durant toute la durée d'utilisation de la machine, sans que celle-ci perde d'énergie, contrairement aux autres machines.

OR LIGHT est d'une extrême **rapidité**, permettant 1 flash par seconde. Le temps de traitement étant considérablement réduit, tout en leur garantissant une précision de traitement. (Tableau)

OR LIGHT dispose d'une technologie brevetée et certifiée. Tous les soins sont programmés par nos experts, garantissant sécurité et confort d'utilisation.

## C – Nos engagements

- Rendre OR LIGHT accessible aux professionnels du monde médico esthétique, grâce à un concept commercial flexible et accessible à tous.
- La garantie d'un appareil efficace et sécurisé.
- Par la performance d'OR LIGHT, la garantie de fidéliser votre clientèle.
- Formation initiale.
- Service commercial et technique à votre disposition.
- Confort d'utilisation.

## **II – Dépilation**

### **A – Introduction**

Grâce à Or LIGHT, vous avez enfin la possibilité d'offrir à votre clientèle une dépilation précise, progressive et durable. Cette méthode ultra performante placera votre institut à la pointe des nouvelles techniques en esthétique.

### **B – Comment ça marche ?**

OR LIGHT agit efficacement sur l'ensemble des poils grâce au spectre lumineux SPL. La lumière envoyée est absorbée par la mélanine des poils, se transforme en chaleur, et détruit la source nourricière des poils en phase anagène, seule phase où le poil est attaché à sa source nourricière. Les poils qui sont en phase catagène et télogène vont poursuivre leur cycle de croissance, et seront détruits lors des séances suivantes. Le pourcentage de poils en phase de croissance varie d'une personne à l'autre, et d'une zone à l'autre. A la 2<sup>ème</sup> séance, de nouveaux poils seront détruits, et ainsi de suite jusqu'à un résultat 90% de poils éliminés.

Dans le cadre d'un soin complet, OR LIGHT garanti un résultat optimal d'élimination de 90% poils en 6 à 10 séances. Les résultats sont visibles et probants dès les premières séances, avec une élimination de 10% à 30% des poils. 2 séances d'entretien sont préconisées l'année suivant le traitement.

Cette méthode permet de traiter l'ensemble du corps et du visage, sans effet secondaire.

### **C – Des soins personnalisés**

Chaque personne possède ses caractéristiques particulières, et a des besoins précis. OR LIGHT permet d'offrir des soins adaptés, correspondants aux exigences de chacun d'entre nous.

Avec OR LIGHT, chaque client sera conseillé et suivi individuellement, de manière à bénéficier de soins parfaitement optimisés. Dès la première séance, un diagnostic sera établi, de manière à définir le soin le plus adapté.

## **III – Photolifting®**

### **A – Introduction**

Au fil du temps, la quantité de collagène et d'élastine de notre peau faiblit. La peau est alors moins flexible, phénomène dû à une diminution de la production d'élastine et de collagène. Elle devient alors plus sèche et plus fine. De nombreuses études ont démontré le rôle bénéfique de la lumière mise sous des longueurs d'ondes précises du spectre visible, sur notre organisme. La technologie de la SPL® est une excellente alternative à la chirurgie et aux produits chimiques, car elle aide l'organisme à naturellement stimuler la production de collagène et d'élastine.

## B – Comment ça marche ?

L'application Photolifting® OR LIGHT vous offre la possibilité de soigner un large panel de signes du vieillissement de la peau par effet lifting : anti-âge, atténuations de l'hyperpigmentation, des rougeurs diffuses et des signes de l'acné.

- **Anti-âge** : sont concernées les rides et ridules. La méthode OR LIGHT va permettre de relancer la production naturelle d'élastine et de collagène, la peau est plus ferme et le galbe du visage retrouvé.
- **Atténuation de l'hyperpigmentation** : sont concernées les tâches de vieillesse. La méthode OR LIGHT va fragmenter le pigment, les tâches vont rétrécir, voire disparaître.
- **Atténuation des rougeurs diffuses** : sont concernés les vaisseaux sanguins. La méthode OR LIGHT va coaguler les vaisseaux, et ainsi les rétrécir.
- **Atténuation des signes de l'acné** : la méthode OR LIGHT va détruire et nettoyer la bactérie, et de cette façon purifier la peau.

Dans le cadre d'un soin complet, OR LIGHT garanti un résultat optimal à partir de 10 séances. Les résultats sont visibles et probants dès les premières séances, les cellules retrouvent leur équilibre naturel, améliorant notablement l'aspect de la peau. Aussi, 2 séances d'entretien par an sont préconisées. Cette méthode permet de traiter le corps et le visage, sans effet secondaire.

## C – Des soins personnalisés

De la même manière que pour la dépilation, OR LIGHT permet de répondre aux besoins de manière individuelle. Ainsi, dès la première séance, un diagnostic de la peau sera établi, le professionnel et le client pourront définir ensemble le nombre de séances nécessaires à un soin complet.

### Soin curatif

Le soin OR LIGHT favorise la formation de nouveau collagène. Les zones traitées par OR LIGHT absorbent la lumière et sont stimulées de manière intense, afin d'améliorer le métabolisme. Les cellules retrouvent leur équilibre naturel, améliorant notablement la production de collagène. Dès la première séance, la peau est plus ferme, le teint plus éclatant et le grain resserré. Après chaque soin, la peau apparaîtra plus douce, plus souple et plus éclatante. Le teint est plus homogène, les ridules et les cernes sont atténués. Cette amélioration sera progressive au fil des séances.

### Soin préventif

Si le photolifting est un excellent soin curatif, il s'avère être très efficace en traitement préventif du vieillissement de la peau. La méthode OR LIGHT est accessible dès 25 ans, âge où l'on observe les premiers signes de ralentissement du renouvellement des cellules cutanées

## IV – Informations Techniques

- **Deux applications :**  
Dépilation.  
Photolifting.
- **Fluence :**  
8 à 20 Joules/cm<sup>2</sup> en épilation  
6 à 14 joules/cm<sup>2</sup> en photolifting
- **Durée du pulse :**  
15/30/50 ms en épilation  
10/15 ms en photolifting
- **Type de pulse :** monopulse SPL
- **Pièce à main**
  - Taille du quartz :  
7,5 cm<sup>2</sup> en épilation  
5 cm<sup>2</sup> en photolifting
  - Recalibration automatique
- **Fréquence de pulse :**  
1 Hertz (1 pulse/seconde).
- **Circuit de refroidissement à eau :**
  - Débit : 1,8 l/mn
  - Cartouche désionisante
- **Poids de la machine :** 34 kg
- **Dimensions de la machine :**
- **Consommation énergie :** 1,1 kg watt.
- Joulemètre intégré
- Ecran tactile
- Panneau de configuration multilingue
- **Evolutivité de la machine :** possibilité de passer d'une application à deux applications